

Durchführung eines SARS-CoV-2 Spucktests

- 1.) Alle Bestandteile des Tests auspacken
- 2.) Röhrchendeckel aufdrehen und Spucktrichter aufschrauben



- 3.) Ungefähr die gleiche Menge Speichel in das Teströhrchen geben, wie sich Flüssigkeit in ihm befindet
- 4.) Spucktrichter abdrehen und Deckel aufschrauben
- 5.) Ca. 10 x kräftig schütteln
- 6.) Deckel abdrehen und mit der Pipette Flüssigkeit aufnehmen



- 7.) 3 Tropfen auf das Feld S der Testkassetten tropfen.
- 8.) Nach 15 Minuten: Ergebnis ablesen
- 9.) Testkassette einpacken, Testutensilien entsorgen

